

 LUFTAMBULANSETJENESTEN		Styrende dokument: Håndbok for MTU i luftambulansetjenesten	Dok. id.: 03-Wentway
Håndbok for medisinsk teknisk utstyr			Versjon: 1.0
			Side: 1 av 1
Ansvarlig: RM	Verifisert: AA	Godkjent: AA	Dato: 04.03.20

Prosedyrer for ukesjekk

Ventway Sparrow Robust



MEKANISK KONTROLL

- Kontroller at det ikke er åpenbare skader på chassis, demand valve (oksygen-ventil montert på baksiden) eller oksygenslange
- Kontroller at display er uskadet, og at innstillingsknapp roterer lett begge veier, og «klikker» når den trykkes inn.
- Demonter demand valve og verifiser at filter for luftinntak bak på respiratoren er rent.
- Verifiser at alle batterier er uskadet og ikke har passert «due» dato.

FUNKSJONSKONTROLL

- Koble til ekstern strømforsyning og monter komplett pasientsett uten testlunge.
- Slå på apparatet og verifiser normal oppstart uten alarmer.
- Verifiser at symbolene  eller  oppe i venstre hjørne i displayet angir batteristatus samt at ekstern strømforsyning er tilkoplek.
- Koble fra strømforsyning og verifiser at du får akustisk alarm.
- Marker symbolet ✓ nede i venstre hjørne, trykk på innstillingsknapp og verifiser at selvtest gjennomføres uten feilmeldinger.
- Velg deretter vekt på pasient, ønsket ventilasjonsmodus og invasiv modus. Koble til testlunge, trykk på ✓ og verifiser at ventilasjon starter.

SLUTTKONTROLL

- Stopp ventilasjon, slå av respiratoren, og koble til demand valve (hvis lokal rutine er at ventilen normalt er tilkoplek)
- Sett i oppladet batteri hvis nødvendig.
- Kontroller at nødvendig tilbehør for pasientbehandling er til stede og pakk ned utstyret i samsvar med lokale rutiner.